

StrumenTM Multizyme

Potent Enzymatic Instrument Cleaner

“三美得”醫療器械多酶清洗液

衛部醫器輸壹字第023163號

含有去除脂肪、蛋白質、碳水化合物和澱粉殘留物的酶，
可確保在高層次消毒和滅菌之前能有效清潔可重複使用之醫療設備/器材。

- 蛋白酶 (Protease) - 分解血液等蛋白質，生物膜中含有粘液和糞便。
- 脂肪酶 (Lipase) - 分解脂質、脂肪相關物質。
- 澱粉酶 (Amylase) - 分解碳水化合物、多醣、唾液和粘液。
- 纖維素酶 (Cellulase) - 分解纖維素、澱粉類物質、細胞壁和細胞膜和糞便。

特點

- 中性pH值的低起泡溶液。
- 氣味宜人。
- 無腐蝕、無污染、不染色。
- 可生物分解且環保。
- 添加非離子表面活性劑，提高清潔效果。
- 有效對抗所有人體分泌物，包括碳水化合物、粘多醣、蛋白質、脂質和澱粉。
- 兼容所有金屬和非金屬、醫療設備和手術器械。
- 容易沖洗，不會堵塞內視鏡或是殘留於醫療器材 / 設備。
- 適用於醫療器材 / 設備手動式清潔、自動化內視鏡處理系統 (AERs) 及超音波清洗等。



醫療器材/設備 生物汙染程度	多酶器械清洗液 建議稀釋濃度 (每公升)	建議浸泡時間(理想水溫: 30-40°C)	
		手動式	自動式
重度且乾燥	1.5% (每公升水加入15ml)	15分	10分
重度	1% (每公升水加入10ml)	10分	8分
中度	0.75% (每公升水加入7.5ml)	8分	5分
輕度	0.5% (每公升水加入5ml)	5分	2分


儲存條件與保存期限

- 請儲放於室溫且通風良好、避免陽光曝曬及火源、人煙鮮少走動、兒童無法觸及之處。
- 保存期限標示於瓶身，儲存期：從製造日起算3年。

Our Accreditations:



Working towards actualization of

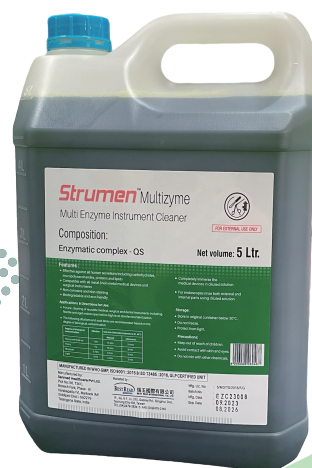

台灣總代理:

BEST READ 瑞玉國際有限公司
BEST READ INTERNATIONAL CO., LTD

408台中市南屯區精誠南路1138-1-33號
TEL:04-24792824 FAX:04-24792140
EMAIL: bestread@best-read.com.tw



SANMED
ACTIVE HYGIENE

Sanmed Healthcare Pvt Ltd

401, Abhi's Hiranya, Guttala Begumpet, Madhapur, Hyderabad 500081
Telephone: 040 4221 2432 Email: info@sanmed.in Web: www.sanmed.in

Presentation : HDPE bottles of
100 ml, 500 ml, 1 L, 3.78 L, and 5 L